



VostraMed
Medical Technology

NephroPatch™

Externer Punktionsverschluss

Selektive Kompression zur Sicherstellung der Shuntfunktion

Pulsative Kompression – Schnell – Komfortabel

Bestellinformation:

NephroPatch™

NephroPatch™ ist eine Handelsmarke von VostraMed. Die Bilder befinden sich im Besitz von VostraMed. Alle Darstellungen sind graphische Darstellungen und keine technischen Zeichnungen oder Fotos. Die Anwendung des beschriebenen Produktes soll nur von fachlich kompetenten Anwendern, welche mit dem Einsatz und möglichen Komplikationen beim Einsatz des Produktes vertraut sind durchgeführt werden. Vor Gebrauch Gebrauchsanleitung betreffend Warnhinweise und möglicher Komplikationen lesen. Der Zulassungsstatus vor Inverkehrbringung ausserhalb der Gültigkeit des CE-Zertifikates ist zu prüfen.

© 2017 VostraMed. Alle Rechte vorbehalten.

10028-002/002-2019-10

| Bestellnummer (EAN) | Beschreibung |
|--|--------------------------|
| 7629999041318 | NephroPatch™ M VE (25x2) |
| 1 Verkaufseinheit enthält 25 Beutel NephroPatch™ | |

Händler:

Für mehr Information:

VostraMed AG
Baarerstattstrasse 6
CH-6340 Baar
Schweiz
Telefon: +41 41 552 25 10
www.vostramed.ch


1

Dialyse in gewohnter Form durchführen. Fistelnadel im Shunt belassen. Erwartete Klebestellen sollen fettfrei und trocken sein.



2

Fistelnadel ca. 1-2 cm aus dem Shunt ziehen. Verschlusselement mittig über Einstichkanal positionieren. Um die gewünschte Wirkung zu erzielen muss NephroPatch™ zirkulär, ohne zu überlappend aufgeklebt werden.

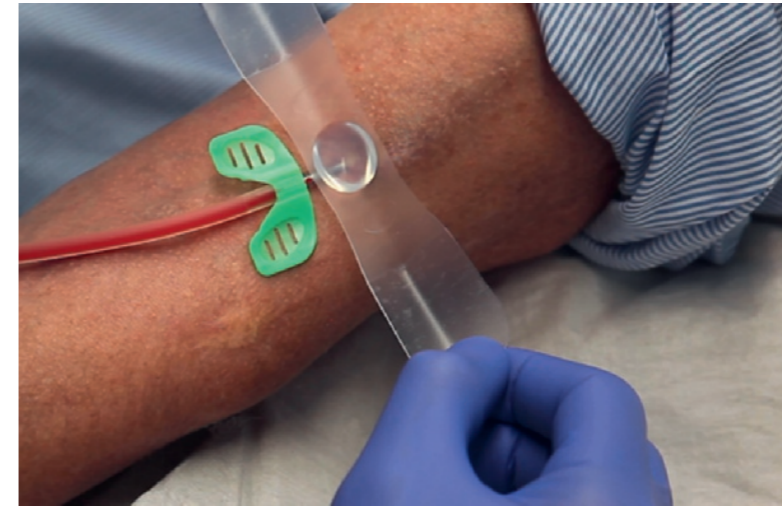

3

Fistelnadel zügig entfernen und für eine kurze Dauer manuell Komprimieren.



4

NephroPatch™ soll so appliziert werden, dass bei Hämostase ein kontinuierlicher Blutfluss möglich ist. NephroPatch™ kann nach 4, idealerweise 8 – 14 Stunden wie ein Pflaster entfernt werden.



Indikation: NephroPatch™ ist ein elastischer Verschluss zum Verschliessen von Punktionsstellen. NephroPatch™ ist selbstklebend ausgerüstet, für die Anwendungen in der Hämodialyse. Dieser externe Verschluss ist als Ersatz für die vom

Patienten, respektive Pflegepersonal ausgeführte manuelle bzw. mechanische Kompression der Punktionsstellen vorgesehen. NephroPatch™ ist nur für den Einmalgebrauch bei chronischer Hämodialyse als Hilfsmittel anzuwenden.